

## Newgene Covid-19 Antigen-Nachweis-Kit-Nasenabstrich

### Allgemeines


- Die verpackten Tests kühl, frostfrei und trocken lagern.
- Die Tests nur bei Raumtemperatur benutzen.
- Die Tests können in separaten Müllbeuteln im Hausmüll entsorgt werden.

### Durchführung


1. Die Verpackung des Probenahme-Tupfers öffnen, dabei die Tupferspitze nicht berühren.

Nun mit dem Tupfer eine Probe aus dem vorderen Nasenbereich entnehmen:


Dafür das Stäbchen vorsichtig **2 – 3 Zentimeter** in die Nase einführen und dabei **für 20 Sekunden** mit leichten Drehbewegungen abstreichen. Den Ablauf in der anderen Nasenhöhle wiederholen.

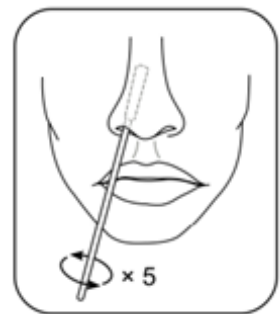


2. Tupfer in das Probenextraktionsröhrchen schieben und diesen in der Lösung **5-mal** umrühren.

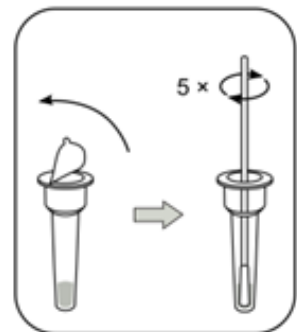


3. Das Röhrchen mit den Fingern zusammendrücken und gemeinsam mit dem Tupfer **3-mal** auf- und abstreifen, um die Probelösung aus dem Tupfer zu entfernen. Anschließend den Tupfer entnehmen.

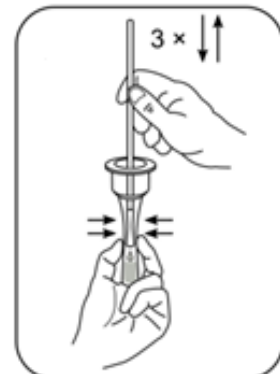

4. Das Extraktionsröhrchen mit der Kappe verschließen und **3-mal** sanft zusammendrücken. Das Röhrchen **1 Minute ruhen** lassen.

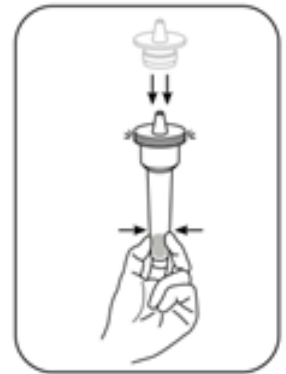


5. Auf die Testkarte **3 Tropfen** aus dem Extraktionsröhrchen vertikal auf die Probenvertiefung „S“ geben und den Timer starten.

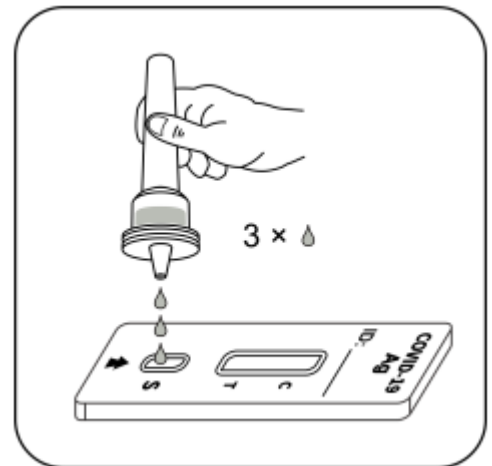

### Ergebnis

- **Nach 15 Minuten** das Testergebnis ablesen und interpretieren.
- Das Testergebnis nicht später als 30 Minuten ablesen.

**positiv**

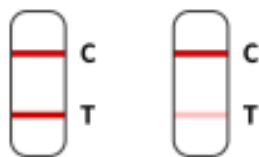

**negativ**



**ungültig**

